



VOCO GmbH  
Knowledge Communication Department

Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

info@voco.de  
www.voco.dental

## VOCO Profluorid Varnish

### توضیحات محصول:

VOCO Profluorid Varnish، نوعی وارنیش حاوی فلوراید است که برای درمان سطوح مینا و عاج دندان بکار گرفته میشود. این محصول برای تسریع «رمینرالیزاسیون» و «فلورایداسیون» ماده به اصطلاح سخت دندان بسیار مناسب است. این وارنیش به دلیل دارا بودن ماتریکس «کالیفون» طبیعی، به سطوح مرطوب نیز میچسبد و با رطوبت و بزاق باقیمانده روی دندان مشکلی پیدا نمیکند. «زایلیتول» نیز به وارنیش اضافه شده است. ماده زایلیتول علاوه بر این که طعم محصول را بهبود میبخشد، از پوسیدگی دندانها نیز جلوگیری میکند.

### برخی از ترکیبات محصول:

VOCO Profluorid Varnish حاوی کالیفون، رایحه ای مصنوعی، سدیم فلوراید و زایلیتول است. ۱ میلیلیتر از VOCO Profluorid Varnish حاوی ۵۰ میلیگرم سدیم فلوراید برابر با ۶,۲۲ میلیگرم فلوراید است.

### موارد منع مصرف:

- VOCO Profluorid Varnish حاوی کالیفون و رایحه ای مصنوعی است. در صورت حساسیت شدید (آلرژی) بیمار به ترکیبات VOCO Profluorid Varnish، نباید از این محصول برای او استفاده شود.
- VOCO Profluorid Varnish برای بیماران دچار زخم لثه و یا التهاب مخاط دهان، مناسب نیست.
- VOCO Profluorid Varnish برای درمان سیستمیک مناسب نیست.

### گروه هدف در بیماران:

VOCO Profluorid Varnish برای تمامی بیماران بدون محدودیت سنی و جنسیتی قابل استفاده است.

### ویژگی‌های عملکردی محصول:

ویژگی‌های عملکردی این محصول با الزامات تعیین شده برای آن و استانداردهای مربوط به آن همخوانی دارد.

### شرایط استفاده:

استفاده از VOCO Profluorid Varnish باید توسط کاربری که بصورت حرفه ای در زمینه دندانپزشکی آموزش دیده است، انجام شود.

### مقدار مصرف پیشنهادی:

- برای درمان بیمارانی که دندان شیری دارند حدود ۰,۲۵ میلیلیتر از VOCO Profluorid Varnish توصیه میشود
- برای درمان بیمارانی که دندانهای مختلط یا دائمی دارند حدود ۰,۴۰ میلیلیتر از VOCO Profluorid Varnish توصیه میشود

لایه ای نازک از VOCO Profluorid Varnish را روی سطح سخت دندان بمالید. اگر ضخامت لایه وارنیش زیاد باشد، اولاً به راحتی از سطح دندان جدا میشود و ثانیاً هیچ مزیت درمانی ندارد.

### آماده سازی:

محل درمان را به دقت از هرگونه چرم پاک کنید. برای بهتر شدن نتیجه کار، مایعات یا بزاق اضافی باید از سطحی که قرار است درمان شود، پاک شود.

### روش استفاده:

VOCO Profluorid Varnish را به طور یکنواخت روی سطح مربوطه بمالید تا تمام آن سطح با یک لایه نازک پوشانده شود. محل استفاده از VOCO Profluorid Varnish را مرطوب کنید (یا از طریق شستشوی سبک آن محل و یا با ترشح بزاق طبیعی) تا حتماً واریش به سطح مربوطه خوب بچسبد.

### نکات و اقدامات احتیاطی:

- باید به بیماران توصیه شود که تا ۴ ساعت پس از درمان، از مصرف غذای جامد و نوشیدنیهای الکلی، شستشوی دندانها و استفاده از نخ دندان پرهیز کنند.
- موارد نادری از ورم ادماتوز پس از استفاده از این محصول، به ویژه پس از استفاده از آن در سطح وسیع، گزارش شده است.
- موارد نادری از ایجاد تنگی نفس در کودکان مبتلا به آسم با درمانها و داروهای مشابه گزارش شده است.
- ممکن است در بیمارانی که دستگاه گوارش آنها حساس است، بعد از انجام درمان در سطح زیاد، حالت تهوع ایجاد شود.
- در صورت بروز حساسیت شدید در بیمار: ابتدا واریش را با یک مسواک نرم و نخ دندان پاک کنید و سپس محل مربوطه را با آب گرم بشویید.
- در روز انجام این درمان، به هیچوجه از سایر درمانها و داروهای حاوی فلوراید استفاده نشود.
- بعد از استفاده از VOCO Profluorid Varnish، تا چند روز از مصرف قرصهای فلوراید خودداری شود.
- این درمصول قابل خوردن نیست.

### شرایط نگهداری:

این محصول باید در دمای ۴ تا ۲۳ درجه سانتیگراد نگهداری شده و نباید پس از انقضای تاریخ مصرف آن، استفاده شود.

### پسماند (زباله) محصول:

پسماند این محصول را مطابق قوانین و مقررات کشور خود دفع کنید.

