

VOCO GmbH  
Knowledge Communication Department  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germania  
info@voco.de  
www.voco.dental



## VOCO Profluorid Varnish

### Descrierea dispozitivului:

VOCO Profluorid Varnish este un lac cu conținut de fluor, destinat tratamentului suprafeței smalțului și suprafeței dentinei. Este ideal pentru remineralizarea și fluorizarea accelerată a așa-zisei substanțe dure a dintelui. Datorită matricei sale naturale de colofoniu, lacul Varnish aderă în egală măsură pe suprafețele umede și tolerează resturile de umiditate și de salivă. În lac este adăugat și xilitol. Pe lângă caracteristicile sale de îmbunătățire a gustului, xilitolului i se atribuie și un efect cariostatic.

### Substanțe conținute (printre altele):

VOCO Profluorid Varnish conține colofoniu, aromă sintetică, fluorură de sodiu și xilitol.  
1 ml de VOCO Profluorid Varnish conține 50 mg fluorură de sodiu, echivalentă cu 22,6 mg de fluor.

### Contraindicații:

- VOCO Profluorid Varnish conține colofoniu și aromă sintetică. Dacă se cunosc hipersensibilități (alergii) la substanțele conținute de VOCO Profluorid Varnish, se va renunța la utilizare.
- VOCO Profluorid Varnish nu se va utiliza la pacienți cu inflamații ulcerose ale gingiei sau ale mucoasei bucale.
- VOCO Profluorid Varnish nu este destinat pentru tratamentul sistemic.

### Grup de pacienți țintă:

VOCO Profluorid Varnish se poate utiliza pentru toți pacienții, fără limitare în ceea ce privește vârsta sau sexul.

### Caracteristicile dispozitivului:

Caracteristicile de performanță ale dispozitivului corespund cerințelor scopului propus și normelor aplicabile cu privire la produs.

### Aplicație:

Aplicația VOCO Profluorid Varnish este rezervată utilizatorilor profesioniști, calificați în domeniul medicinei dentare.

Doza recomandată:

- Tratamentul pacienților cu dentiție de lapte cca 0,25 ml de VOCO Profluorid Varnish
- Tratamentul pacienților cu dentiție mixtă sau permanentă cca 0,40 ml de VOCO Profluorid Varnish

Aplicați o peliculă subțire de VOCO Profluorid Varnish pe substanța dură a dintelui. O peliculă groasă se desprinde ușor și nu oferă avantaje terapeutice.

**Pregătire:**

Curățați de piatră suprafața tratată, în mod riguros. Pentru a obține un rezultat optim, lichidul, respectiv saliva în exces trebuie îndepărtat(ă) de pe suprafața tratată.

**Aplicare:**

Aplicați VOCO Profluorid Varnish în mod uniform, așa încât toată suprafața să fie acoperită cu o peliculă subțire. Umeziți zona utilizării (fie prin clătire ușoară, fie prin fluxul natural de salivă), pentru a garanta aderența VOCO Profluorid Varnish.

**Indicații/măsuri de precauție:**

- Pacienților trebuie să li se atragă atenția să evite consumul de alimente solide, alcool, precum și spălarea pe dinți și utilizarea aței dentare timp de 4 ore după tratament.
- Doar în cazuri rare s-au semnalat umflături edematoase, în mod special după utilizarea pe suprafețe mai mari.
- La preparate similare, în cazuri foarte rare s-a semnalat dispnee la copiii cu astm.
- La pacienții cu sistem digestiv sensibil, după un tratament complet, pot apărea stări de greață.
- În caz de hipersensibilitate: Îndepărtați lacul cu o periuță de dinți cu peri moi și ață de dinți, apoi clătiți cu apă caldă.
- În ziua tratamentului nu efectuați nicio altă aplicație cu preparate cu conținut de fluor.
- După tratamentul cu VOCO Profluorid Varnish, administrarea de tablete pe bază de fluor trebuie suspendată câteva zile.
- Lacul nu trebuie înghițit.

**Depozitare:**

A se depozita la 4 °C –23 °C. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate.

**Eliminare:**

Eliminarea dispozitivului se face conform dispozițiilor legale locale.

